

### **Fußteil – Verstellung öffnen:**



Öffnen des Plastikteil:

Fahren Sie mit einem schmalen Schraubenzieher zwischen die beiden Schalen und öffnen Sie die Verstellung.

### **Fußteil – Verstellung schließen:**



Stecken Sie die Feder in die runde Ausnehmung



Drücken Sie den Verstellknopf auf die Feder – bitte beachten Sie die Ausnehmungen für die richtige Position!



Führen Sie die beiden Plastikschalen wieder zusammen



Drücken Sie den beiden Plastikschalen fest zusammen – es müssen drei Haken einschnappen.

